

URGOSORB
Compresse et mèche plate**PANSEMENT ABSORBANT ALGINATE / HYDROCOLLOÏDE****□ DESCRIPTION :**

UrgoSorb est un pansement stérile composé de fibres d'alginate de calcium et de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose sodique), polymères d'origine naturelle connus pour leur fort pouvoir d'absorption.

□ PROPRIETES :

UrgoSorb est un pansement favorisant la cicatrisation par gélification de ses composants au contact des exsudats de la plaie.

UrgoSorb se retire facilement, même hydraté, sans douleur et d'un seul tenant.

□ INDICATIONS :**CICATRISATION :**

UrgoSorb est un pansement destiné aux soins locaux des plaies moyennement à fortement exsudatives en phase de détersion et de bourgeonnement notamment :

- plaies post-chirurgicales (moignons d'amputations, cavités abcédées ...),
- plaies chroniques (escarres de décubitus, ulcères de jambes...).

UrgoSorb peut être utilisé sur des plaies présentant des signes cliniques d'infection sous réserve d'une surveillance médicale appropriée. **UrgoSorb** est également indiqué dans les plaies hémorragiques.

UrgoSorb mèche est destiné aux soins locaux des plaies cavitaires ou tunnelisées (escarres profondes, anfractueuses, sinus pilonidaux).

HEMOSTASE :

Par activation plaquettaire, **UrgoSorb** est un pansement favorisant l'hémostase primaire des plaies aiguës et chroniques présentant un saignement.

UrgoSorb mèche est destiné aux soins locaux des plaies cavitaires hémorragiques.

□ MODE D'EMPLOI :

Préparation de la plaie :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique. Après utilisation d'antibiotiques, de corticoïdes ou de solutions antiseptiques alcalines, rincer avec du sérum physiologique.
- Sécher le pourtour avec une compresse stérile.

Application du pansement :

- Appliquer **UrgoSorb** directement sur la plaie.
- Dans le cas de l'ulcère de jambe, une humidification de la compresse en regard de la plaie avec une solution de sérum physiologique peut être réalisée.
- Assurer le maintien d'**UrgoSorb** à l'aide d'un pansement secondaire (compresses et bande de fixation).
- En cas d'escarre sacrée et d'incontinence, recouvrir d'un pansement hydrocolloïde extra-mince.
- Jeter toute partie non utilisée selon les procédures et directives locales.

Changement du pansement :

- Le pansement **UrgoSorb** sera renouvelé lorsqu'il est saturé.
- Cette fréquence de renouvellement est de :
 - o une fois par jour en cas de détersion de débris fibrino-nécrotiques et de plaie fortement exsudative ou infectée,
 - o tous les 2 jours en cas de plaie moyennement exsudative.

Retrait du pansement :

- Oter le pansement secondaire et retirer **UrgoSorb**.
- Dans l'ulcère de jambe, **UrgoSorb** peut être humidifié à l'aide de sérum physiologique pour en faciliter le retrait.
- Appliquer un nouveau pansement **UrgoSorb** comme précédemment décrit.

Utilisation d'**UrgoSorb mèche** :

- Pour les plaies cavitaires et profondes (escarres anfractueuses) appliquer **UrgoSorb mèche** de façon lâche sans exercer de pression excessive.
- En se gélifiant, **UrgoSorb mèche** se conforme aux parois de la cavité.
- **UrgoSorb mèche** se retire facilement d'un seul tenant. S'assurer du retrait de la totalité de la mèche dans la plaie.
- Utiliser les mêmes techniques de pansement secondaire qu'avec **UrgoSorb compresse**.

□ CONTRE-INDICATIONS :

Mèchage endo-nasal en chirurgie rhino sinusienne.

Plaques de nécrose sèche de l'escarre.

Brûlures profondes, brûlures du 3^{ème} degré.

Plaies peu exsudatives.

Sensibilité connue au pansement.

□ MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Non résorbable, **UrgoSorb** ne doit pas être utilisé comme compresse chirurgicale implantable.
- Ne pas associer les pansements **UrgoSorb** avec des solutions antiseptiques alcalines (incompatibilité physico-chimique). En cas d'utilisation, rincer la plaie avec du sérum physiologique avant d'appliquer **UrgoSorb compresse et mèche**.
- Conditionnement individuel stérile à usage unique : la réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

- Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas re-stériliser.

□ CONDITIONS DE CONSERVATION :

Stocker à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur (température < à 25° C).
Radiosterilisé par rayonnement β .

□ PRESENTATIONS :

FORME	CODE	DIMENSION	CONDITIONNEMENT
UrgoSorb compresse	501667	5 cm x 5 cm	boîte de 10 pansements
	501663	10 cm x 10 cm	boîte de 10 pansements
	501670	10 cm x 20 cm	boîte de 16 pansements
UrgoSorb mèche plate	508282	5 cm x 30 cm	boîte de 16 mèches plates

□ DONNEES TECHNIQUES :

NATURE DES CONTROLES	SPECIFICATIONS
Apparence	Compresse non fissée blanche à écrue constituée de fibres d'alginate de calcium et CMC, protégée par 2 protecteurs
Teneur en eau	$\leq 25 \%$
Capacité d'absorption	$\geq 16 \text{ g}/100 \text{ cm}^2$
Grammage	100 à 170 g/m ²
Acidité	$\leq 1 \text{ ml NaOH}$
Scellage et pelabilité	Aucun décollement ou défaut au niveau des zones de scellage. Ouverture à la main aisée
Surface du pansement	\geq à la surface théorique
Paramètres de stérilisation	Conforme à la norme ISO 11137
Stérilité : libération paramétrique*	Conforme à la norme ISO 11137
Péremption	3 ans

* Note: le test de stérilité n'est pas réalisé en routine. La stérilité du produit est conforme si les paramètres de stérilisation sont conformes.

□ STATUT REGLEMENTAIRE :

- Dispositif médical marqué CE 0459.

URGOSORB est un produit des
Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE