

Laboratoires URGO
FICHE TECHNIQUE ET DE SPECIFICATIONS

URGO MULTI-EXTENSIBLE, Peaux sensibles / URGOMULTI

DESCRIPTION:

Pansements présentés en pansements pré-découpés et bandes à découper.

Pansement composé :

- d'un support élastomère en polyuréthane thermoplastique de couleur chair enduit d'une masse adhésive acrylique à base d'eau
- d'une compresse centrale blanche en viscose/polypropylène/polyéthylène recouverte d'un voile polyéthylène non adhérent.

L'ensemble est protégé par deux ailettes blanches en papier siliconé sur une face.

Les pansements pré-découpés sont conditionnés individuellement dans un sachet en papier.

PROPRIETES:

Son support

- Extensible, il accompagne vos mouvements
- Confortable, il évite toute gêne
- Micro-aéré, il laisse respirer la peau

Sa compresse

- Anti-adhérente, elle ne colle pas à la plaie

INDICATIONS:

Protection des petites plaies du quotidien.

MODE D'EMPLOI:

Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour. Appliquer le pansement en lissant soigneusement les bords. A renouveler au moins 2 fois par jour.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Il n'y a pas de mise en garde ou de précautions particulières d'emploi.

CONDITIONS DE CONSERVATION:

Il n'y a pas de condition particulière de conservation.

DONNEES TECHNIQUES:

NATURE		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
SUPPORT ENDUIT	Pouvoir adhésif	0.5 à 3.5 N/cm
	Conformabilité : Extensibilité	≤ 2.2 N/cm
	Conformabilité : Déformation	≤ 3.0 %
COMPRESSE	Capacité d'absorption	≥ 420 g/m ²
PEREMPTION		5 ans

STATUT REGLEMENTAIRE:

En Union Européenne : « URGO MULTI-EXTENSIBLE, Peaux sensibles» est un dispositif médical, marqué CE (Classe I).

Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE