

Extensa® Plus Qualité Hôpital

Bande adhésive élastique



Référence	Taille ou dimensions
928646	3 cm x 2,5 m
928647	6 cm x 2,5 m
928648	8 cm x 2,5 m
928649	10 cm x 2,5 m

Produit

Bande élastique dans le sens de la longueur, avec lisières tissées, enduite d'une masse adhésive, hypoallergénique, recouverte d'un protecteur en polyéthylène.
Non stérile.

Indications / Classification

Traumatologie générale et médecine du sport : prévention et traitement des systèmes musculo-tendineux et ligamentaires des articulations

Phlébologie : traitement de l'insuffisance veineuse et de ses diverses complications

Maintien de pansements : fixation de pansements sur toutes parties du corps.

Extensa® Plus Qualité Hôpital est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Bande tissée : 100% coton.

Masse adhésive : à base de caoutchouc synthétique et d'oxyde de zinc.

Protecteur en polyéthylène gaufré.

Caractéristiques :

Longueur non étirée : 2,5 m env.

Elasticité : > ou = 50 %

Couleur : blanche

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Chaque bande est emballée individuellement sous film, puis conditionnée en vrac dans un carton.

Accompagné d'une notice d'emploi (imprimée sur le carton).

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb cartons / palette	Dimensions carton	Dimensions palette
928646	3 cm x 2,5 m	60	108	384 x 321 x 82 mm	1200 x 800 x 1800 mm
928647	6 cm x 2,5 m	30	108	384 x 321 x 82 mm	1200 x 800 x 1800 mm
928648	8 cm x 2,5 m	30	96	391 x 307 x 105 mm	1200 x 800 x 1800 mm
928649	10 cm x 2,5 m	30	72	390 x 322 x 125 mm	1200 x 800 x 1800 mm

Péremption

Durée de vie : 3 ans.

Précautions d'emploi

Atteintes graves nécessitant une immobilisation totale.

Appliquer sur peau propre et sèche. Ne pas appliquer en cas de fragilité cutanée ou directement sur une plaie cutanée. Ne jamais appliquer la bande en tension maximale. En cas d'engourdissements ou de sensations douloureuses, ôtez la bande et refaites le bandage moins serré.

Si la douleur persiste ou en cas de difficultés, demandez conseil à votre pharmacien, kinésithérapeute ou à votre médecin.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas de problèmes artériels, de graves problèmes vasculaires et en cas d'œdème sévère (sur avis médical). Hypersensibilité à un des constituants.

Conditions de conservation et stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil et à une température comprise entre 5 et 30°C.